



Il est important de comparer le nombre, la taille, la forme et la position des nuages de points à ceux d'un animal sain de la même espèce. De plus, chaque nuage de points doit être bien séparé des autres afin de s'assurer que l'analyseur n'a pas confondu les populations et que la formule est correcte.

Nuages de points normaux

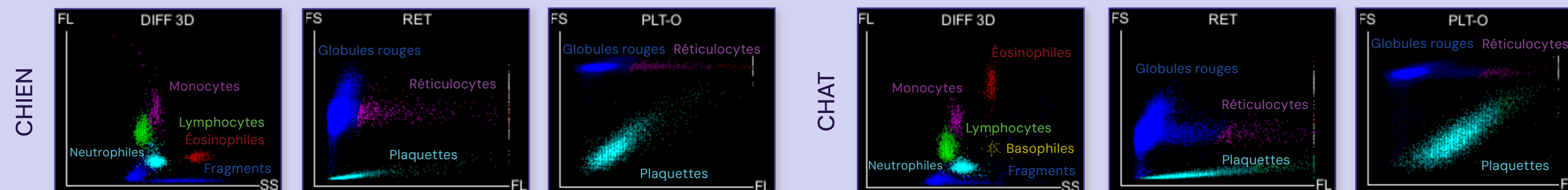

Nuages de points anormaux – Les nuages de points normaux représentés par des pointillés ont été superposés sur les graphiques.

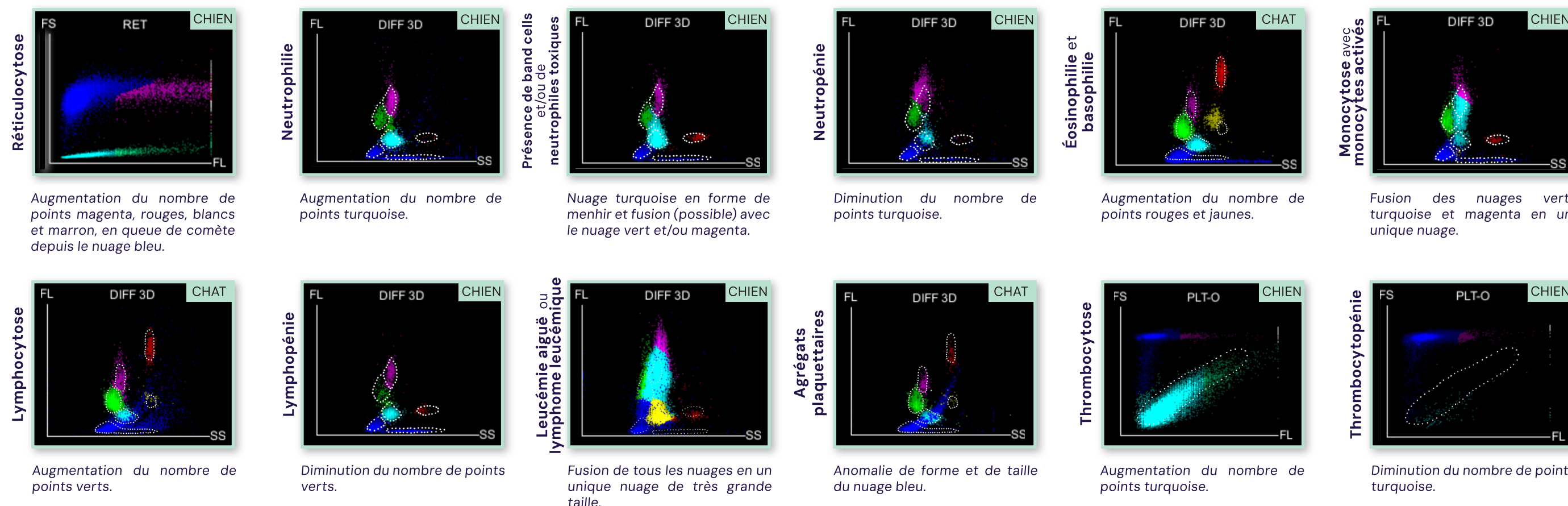

Légende des axes

FL : Fluorescence = quantité d'acides nucléiques

FS : Forward Scatter = Volume cellulaire – SS : Side Scatter = granularité cellulaire